

Röntgen hívó és fixáló vegyszerek készre-keverése

A hívó melletti, jobb oldali oszlopban az adott hívóhoz szükséges fixáló található!

PROTEC Magyarország kft. 1038. Bp. Szentendrei út 246.

Hívók


Fixálók

ROENTOROLL CRE

2x 20 l-hez

Cikkszám: 104000

Felhasználási terület: Fényképezési előhívó röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1-2-3 -as komponenst. Egy adag megkeverésével 20 liter kész vegyszert kapunk.

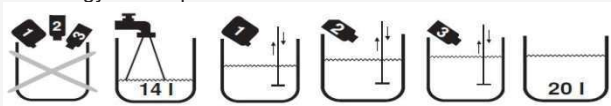


+

SUPERFIX MRP

2x 20 l-hez

Cikkszám: 103594

Felhasználási terület: Fényképezési fixáló röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1-es és 2-es komponenst. Egy adag megkeverésével 20 liter kész vegyszert kapunk.

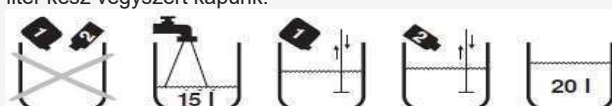


ROENTOROLL HC

2x 20 l-hez

Cikkszám: 104491

Felhasználási terület: Fényképezési előhívó röntgen filmekhez
Használati utasítás (keverés): Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1-2-3 -as komponenst. Egy adag megkeverésével 20 liter kész vegyszert kapunk.

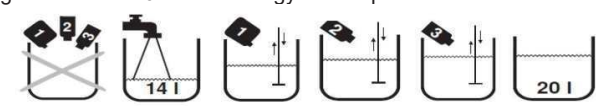


+

SUPERFIX MRP

2x 20 l-hez

Cikkszám: 103594

Felhasználási terület: Fényképezési fixáló röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1-es és 2-es komponenst. Egy adag megkeverésével 20 liter kész vegyszert kapunk.

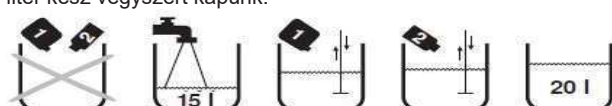


ROENTOROLL-25

12x 2,5 l-hez

Cikkszám: 104700

Felhasználási terület: Fényképezési előhívó röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1-es és a 2-es komponenst. Egy adag megkeverésével 2,5 liter kész vegyszert kapunk.

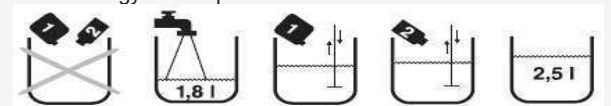


+

SUPERFIX-25

12x 2,5 l-hez

Cikkszám: 104701

Felhasználási terület: Fényképezési fixáló röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1 flakon komponenst. Egy adag megkeverésével 2,5 liter kész vegyszert kapunk.

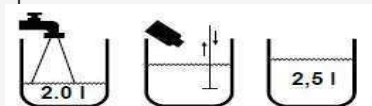

ROENTOGEN fogászati hívó 10x0,5

10x 1,1-1,2 l-hez

Cikkszám: 102408

Felhasználási terület: Fényképezési előhívó röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1 flakon komponenst. Egy adag megkeverésével kb. 1,2 liter kész vegyszert kapunk.



+

ROENTOGEN fogászati fixáló 10x0,5

10x 1,1-1,2 l-hez

Cikkszám: 102413

Felhasználási terület: Fényképezési fixáló röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve állandó keverés mellett betöltjük az 1 flakon komponenst. Egy adag megkeverésével kb. 1,2 liter kész vegyszert kapunk.




ROENTOGEN poralapú kézi hívó 10 liter

1x 10 l-hez

Cikkszám: 103 430

Felhasználási terület: Fényképezési előhívó röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve, először betöltünk kb 8 liter langyos vizet, majd hozzáadjuk intenzív keverés mellett az 1. és a 2. komponenst. Ha feloldódott, kiegészítjük 10 literre. Egy csomag felhasználásával 10 liter kész vegyszert kapunk.

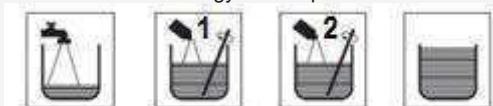

+

ROENTOGEN poralapú kézi fixáló 10 liter

1x 10 l-hez

Cikkszám: 103 530

Felhasználási terület: Fényképezési fixáló röntgen filmekhez
Használati utasítás: Az alábbi ábrát követve, először betöltünk kb 8 liter langyos vizet, majd hozzáadjuk intenzív keverés mellett az egy zacskó fixálót. Ha feloldódott, kiegészítjük 10 literre. Egy adag megkeverésével 10 liter kész vegyszert kapunk.



A vegyszerek tárolása: száraz, hűvös helyen tárolandó, hőmérséklet 5-25 C° között.

Gyártó: Tetenal Europa GmbH, Schützenwall 31-35, 22844 Norderstedt/Germany, Tel. +49/40-521-450