

## Termékismertető és kezelési leírás

### Dr. Goos-Suprema GmbH

Nagyon köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és a Dr. Goos-Suprema GmbH termékét választotta. Gyártási tapasztalatunk több évtizedes múltat tekint. A termékeink kiváló minősége garantálja, hogy a páciensekre, orvosokra és a röntgenben dolgozó személyzetre ható röntgen sugárzást a lehető legnagyobb mértékben, az elviselhető, minimális szintre csökkentse.

### Információk


Termékeink védőrétege ólom-gumi, illetve az ólommal egyenértékű (lásd ólommentes védőruhák!) védelemmel rendelkező anyagból készültek. Orvosoknak készült sugárvédelmi ruházataink a sugárvédelmi ruházatokról szóló (PSA/98/686/EWG) EU szabvány besorolása alá esnek és ennek megfelelően a CE No. 0123 számú előírás szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek. Minden termékünk rendelkezik a CE 0123 tanúsítvány címkéjével. Pácienseink számára készült termékeink a MDD 93/42 EWG-nek megfelelnek és "CE" címkével vannak ellátva.

Az orvosok és a páciensek számára készült termékeink az alábbi szabványoknak felelnek meg: **DIN EN 61331-3** és RÖV. Feltételezzük, hogy a röntgengépekkel dolgozó orvos tisztában van a sugárvédelmi eszközök használatával (a védőruha mérete a címkén fel van tüntetve: hossz, és méret). A 0,35 mm-nél vastagabb ólomréteggel egyenértékű/azzal ellátott védőfelszerelés tartós viselésre nem ajánlott (lásd: a címkén a besorolást). A betegek számára 0,50mm vastagságú ólomréteggel egyenértékű ruházat viselése szükséges.

### Használati utasítás, tárolás

Sugárvédelmi kötényeinket vállfával együtt csomagoljuk, a tárolása lógatva történjék (a helyes tárolás érdekében, kérjük válasszon különböző tartóink, vállfáink és fogasaink közül). Soha ne tegye eszközeinket radiátor/hősugárzó közelébe, rá, illetve elé! Vigyázzon az éles eszközök közelében, nehogy kárt tegyenek a sugárvédelmi ruházatban!

### Tisztítás/kezelés

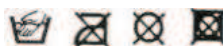

Kérjük, vegye figyelembe a termék külső bevonatát (SupraTex és SupraSoft). A szennyeződéseket, különösképpen a kontrasztanyagokat, vért, vagy egyéb más ráomlott folyadékot törölje le langyos fertőtlenítőszeres puha ronggyal, hogy megelőzze a rászáradást. SupraTex és SupraSoft bevonathoz ne alkalmazzon agresszív tisztítószeret, úgymint: benzint, hígítót, alkoholt. Használjon "SupraPflege-Set"-et a kötének ápolásához, tisztántartásához és fertőtlenítéséhez.

### Sugárvédelmi kesztyűk tisztántartása és sterilizálása

Standard sugárvédelmi kesztyűk szennyeződésének eltávolításához törölje le langyos fertőtlenítőszeres puha ronggyal, majd folyó vízzel öblítse le. Sebészeti kesztyűk tisztántartása: a **SupraTex** borítóanyag a legmodernebb, rugalmas, puha vinyl anyag, könnyen tisztítható, tisztító folyadék rendelhető!

### Sugárvédelmi ruházatok vizsgálata

Minden sugárvédelmi eszközt évente kétszer át kell vizsgálni annak esetleges károsodása miatt, úgymint: gyűrődések vagy sérülések stb. Néha a sugárvédelmi kötének alján egy "dudor" látható, mely az ólom-gumi anyag leszakadásából származhat. Az átvizsgálásnak egy röntgengéppel történő átvilágítást is tartalmaznia kell, amelynek segítségével az esetleges gyűrődések illetve szakadások felfedezhetőek.

### **SOHA NE HASZNÁLJON HIBÁS/HIÁNYOS SUGÁRVÉDELMI ESZKÖZT!**

A sugárvédelmi eszközök tartóssága a kezelésüktől függ.

### Gyártó:

Dr. Goos Suprema GmbH Production and Sale of X-Ray Accessories  
D-69126 Heidelberg, Brechtelstrasse 29.

### Magyarországi képviselő és forgalmazó:

PROTEC Magyarország Kft.  
1038 Budapest, Szentendrei út 246.  
Tel: +36-1-242-2016 Fax: +36-1-242-7568  
www.protec.co.hu