

„Desomed-Rapid Universal”

Védőruha tisztító és fertőtlenítő

Használati utasítás Supratex és Suprasoft fedőrétegű védőöltözésekhez

Kiszerelés:

500 ml / flakon

Kémiai összetétel, 100 g tartalmaz:

Diedecyldimethylammoniumchlorid

0,25 g

Benzylidimethylammoniumchlorid

0,50 g

Használati információk:

Felületi fertőtlenítő a védőruhák gyors fertőtlenítéséhez mindennapos használatra a gyógyászat területén.

Alkalmazás:

A permettel teljesen nedvesítse be a szennyezett területet, majd enyhe nyomással törölje le a szennyezést egy eldobható törölkendővel!

Reakcióidő:

Bakterizid inkl. MRSA, fungzid:

konz. 1 min.

BVDV*/Vaccina*/Rota-Viren:

konz. 30 sec.

Papova-Viren:

konz. 2 min.

Általános információk:

Erősen szennyezett és már beszáradt foltokat (pl. vérfolt) az anyagból nem távolít el. Ezért a vérfoltot a kötényekből a használat után azonnal ki kell tisztítani! Ez történhet langyos víz és nem agresszív tisztítószer használatával, de ez az eljárás önmagában nem fertőtleníti a védőruhát.

DGHM / VAH
által listázott