

# „Descosept-Spezial”

## Használati utasítás Tisztító és fertőtlenítőszer Supratex és Suprasoft fedőrétegű védőöltözékekhez

### Kiszерelés:

500 ml / flakon

### Kémiai összetétel, 100 g tartalmaz:

Alkyl (C12-16) dimethylenzylammoniumchlorid 0,25 g

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,50 g

### Használati információk:

Felületi fertőtlenítő a védőruhák gyors fertőtlenítéséhez mindennapos használatra a gyógyászat területén.

### Alkalmazás:

A permettel teljesen nedvesítse be a szennyezett területet, majd enyhe nyomással törölje le a szennyezést egy eldobható törlőkendővel!

### Reakcióid :

Bakterizid, levurozid:

BVDV\*/Vaccina\*/Rota-Viren:

Papova-Viren/SV40-Viren:

konz. 1 min.

konz. 30 sec.

konz. 2 min.

### Általános információk:

Erősen szennyezett és már beszáradt foltokat (pl.vérfolt) az anyagból nem távolít el. Ezért a vérfoltot a kötényekből a használat után azonnal ki kell tisztítani! Ez történhet langyos víz és nem agresszív tisztítószer használatával, de ez az eljárás nem fertőtleníti a véd ruhát.

DGHM / VAH  
által listázott

2023.01.01